



TVÄTTRÅD

# Så rengör du dina Sacci-produkter

Väskor från SACCI får tvättas i tvättmaskin på 40°C. De får ej centrifugeras utan ska droptorka. Får ej heller torktumlas.

Vid blod eller uppkastning på/i väskan, spola först av med vatten skura/torka av med Virkon eller liknande bakteriedödande medel. Kör sedan väskan i tvättmaskin på 40°C.

Tag ur läkemedelsdelen och andra lösa väggar. Tvätta väska och läkemedelsdel separat. Väskan kan vara öppen vid tvätt.

OBS! Använd så stor tvättmaskin som möjligt, helst på tvätterier eller om möjligt större än 7 kilo. För väskor med plast-eller metallinsatser rekommenderas professionellt tvätterier.

**Från Torsång till världen.** Med våra rötter mellan skogarna och den vindlande älven i Torsång har familjeföretaget levererat ryggsäckar och bärutrustning för extrema förhållanden i över hundra år. Då som nu är det hantverksskickligheten, nytänkandet och kvaliteten på våra produkter som gör oss omtalade.

Sacci Ryggsäckar AB, Gamla Tunavägen 8, 784 36 Borlänge, SWEDEN  
Tel: 0243-932 50, [sacci@sacci.se](mailto:sacci@sacci.se)

[WWW.SACCI.SE](http://WWW.SACCI.SE)

**SACCI**  
SINCE 1914